

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------|
| Fachgruppe des "LIV Bayern" | Formular | Bezeichnung: | FM 8.2.1-003 |
| | Gebrauchsanweisung für orthopädische Maßschuhe | Revision: | 7 |
| | | Freigabe: | 02.12.2021 |
| | | Seite: | 1 von 2 |

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin

Ihr Arzt hat Ihnen ein Paar orthopädische Maßschuhe verordnet. Das von uns individuell gefertigte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung gemäß Artikel 2 Nr. 3 der Verordnung (EU) 2017/745 und nur für Ihren Gebrauch bestimmt.



Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Orthopädischen Maßschuhe dienen zur Behandlung von Füßen, um Fußdeformitäten entgegenzuwirken. Druckverteilung können je nach Erkrankung verbessert werden. Kontraindikationen, bei denen die Anwendung von orthopädischen Maßschuhen ausgeschlossen wird, können bei Unverträglichkeiten gegenüber verwendeten Materialien oder Eigenschweißreaktionen auftreten.

Maßschuhe benötigen eine Eingewöhnungszeit. Wir empfehlen Ihnen die Tragedauer täglich zu erhöhen:

1. Tag, am Vormittag und am Nachmittag: ca. 15 Minuten
2. Tag, am Vormittag und am Nachmittag: ca. 30 Minuten
3. Tag, am Vormittag und am Nachmittag: ca. 90 Minuten

Nach spätestens 14 Tagen sollte die Maßschuhe beschwerdefrei getragen werden können.

Tragen Sie bitte ausschließlich Ihre Maßschuhe, auch im Haus und während der Freizeit. Badeschuhe und Sportschuhe nach Maß können bei Bedarf ebenfalls verordnet werden.

Bitte untersuchen Sie Ihre Maßschuhe vor jedem Gebrauch auf Funktionstüchtigkeit, Verschleiß oder Beschädigung. Stellen Sie Veränderungen oder Auffälligkeiten fest, kontaktieren Sie uns umgehend und tragen Ihre Schuhe nicht mehr.

Kontrollieren Sie Ihre Füße täglich auf Rötungen, Blasenbildung, Druckstellen, Allergische Reaktion, Verletzungen oder Passform durch Ödeme (Wassereinlagerungen). Ihre Schuhe sollten immer beschwerdefrei sitzen. Alle Veränderungen an Ihren Füßen erfordert unbedingt die Ansicht von Ihrem Arzt oder Orthopädienschuhmacher.

Bei größeren Gewichtsänderungen ist ggf. eine Änderung oder Neuanfertigung erforderlich.

Vermeiden Sie Temperaturen unter -20 Grad und über +50 Grad, da es zu Versprödung und Brüchen kommen kann, sowie zu Verformungen der Maßschuhe mit der Folge, dass sich die Passform verändert.

Orthopädische Maßschuhe können in der Regel 2 Jahre getragen werden, Hausschuhe 4 Jahre.

Produktbeschreibung:

Die orthopädischen Maßschuhe ist eine handwerkliche Einzelanfertigung. Sie bestehen aus einem Schaft, stützenden und führenden Elementen, aus der Laufsohle, dem Absatz und der Fußbettung. Diese Komponenten können aus verschiedenen Materialien (Kork, Leder, thermoplastische Kunststoffe und Faserverbundwerkstoffe) verarbeitet werden.

Anziehtipps:

Achten Sie bitte vor dem Anziehen auf evtl. Fremdkörper im Schuh. Vermeiden Sie Futter- und Strumpffalten.

Öffnen Sie alle Verschlüsse an Ihrem Schuh, um problemlos in den Schuh gleiten zu können.

Schließen Sie Verschlüsse gleichmäßig und ohne Druck, danach überprüfen Sie den richtigen Halt.

Pflege und Hygiene:

Zur Vorbeugung von Pilzbefall, Entzündungen und Infektionen, waschen Sie Ihre Füße täglich mit einer hautfreundlichen Seife.

Um die Lebensdauer zu erhöhen, pflegen Sie Ihre Maßschuhe regelmäßig mit den zum Material passenden Pflegemitteln. Wir beraten Sie gerne.

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|
| Fachgruppe des "LIV Bayern" | Formular | Bezeichnung: | FM 8.2.1-003 |
| | Gebrauchsanweisung für orthopädische Maßschuhe | Revision: | 7 |
| | | Freigabe: | 02.12.2021 |
| | | Seite: | 2 von 2 |

Für eine notwendige Desinfektion verwenden sie ein handelsübliches alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel.

Orthopädische Maßschuhe sind nicht für die Waschmaschine geeignet.

Bei Nässe lassen Sie Ihre Schuhe an der Luft trocknen und legen sie niemals zum trocknen auf die Heizung oder einen Ofen.

Wartung und Instandhaltung

Ihre orthopädischen Maßschuhe sind vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen zu prüfen. Achten Sie auf jegliche Veränderung, die sich am Material zeigen und setzen sich für die Instandsetzung mit uns in Verbindung, da Sie sonst Ihre Gewährleistungsansprüche verlieren.

Abgelaufene, gelöste Sohle oder Sohlenspitze und schief getretene Schuhe können orthopädische Probleme verursachen, sowie auch Verletzungen am Fuß und Stürze. Bitte bringen Sie die Schuhe umgehend zu uns zur Reparatur!

Um das bestmögliche Therapieziel zu erreichen und eine ordnungsgemäße Behandlung mit Verlaufsdokumentation zu gewährleisten, sollten Sie unbedingt Ihre Kontrolltermine einhalten.

Bitte bringen Sie zum Termin ein Paar Wechselschuhe mit.

| Termin | Hinweis |
|--------|--|
| | 1. Kontrollbesuch (Passform, Sitz, Fuß) |
| | 2. Kontrollbesuch (Verschleiß, Material) |
| | 3. |

Entsorgung



Die Umwelt liegt uns am Herzen – Bitte entsorgen Sie Ihre Schuhe und Einlagen ordnungsgemäß im Restmüll oder bringen Sie für die Entsorgung bei uns vorbei.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Problemen rund um Ihr Medizinprodukt



| | |
|--|--|
| | Ihr Gesundheitspartner Schuh Mayer e.K. Holzhauser Str. 1 84533 Niedergottsau Telefon 08678 / 356 Telefax 08678 / 71 89 info @schuh-mayer.de www.schuh-mayer.de |
| | |